



Diversey™

Oxivir Excel Wipe

Effektiv rengørings- og desinfektionswipes til ikke-invasive medicinske emner og ikke-porøse overflader

Beskrivelse

Oxivir Excel Wipe er en kombination af et rengørings- og desinfektionsmiddel, der udnytter AHP-teknologien. Oxivir Excel Wipe giver dig det bedste alternativ til en traditionel desinficering, idet det yder total virucidal virkning på kun 30 sekunder. Produktet er skånsomt over for overflader og samtidig uden risiko for dine ansatte, kunder, gæster, patienter eller besøgende. Den aktive ingrediens, hydrogenperoxid, nedbrydes på få minutter til de ufarlige stoffer vand og ilt.

Oxivir Excel CE er derfor et miljøvenligt produkt, som ikke efterlader farlige stoffer eller ændrer overfladernes egenskaber.

Egenskaber

- Fuld virucidal virkning på kun 30 sekunder.
- Hurtig virkning over for et bredt spektrum af vira, bakterier og gærsvampe.
- Fremragende rengøringsegenskaber som overfladeaktivt middel.
- Duftfrit.
- Afskylning ikke påkrævet.
- Miljøvenligt over for omgivelser og brugere, da det nedbrydes til vand og oxygen og ikke til stoffer af typerne APE, NPE og VOC.
- Det aktive indhold nedbrydes til vand og ilt




Fordele

- Den bredspektrede virkning yder et højt desinfektionsniveau.
- Vidtgående testet efter EU-normer (EN-test).
- Høj effekt over for et stort antal sygdomsfremkaldende stoffer.
- Fuld virucidal virkning over for såvel Polio, Adeno og Murine norovirus som kappebærende virus, fx HIV, HBV, HCV, Influenza, VACV og Coronavirus.
- Sikker for brugerne. Kræver ikke PPE. Ingen fareklassificering.
- Fremragende rengøringsegenskaber, der er ti gange hurtigere end din normale desinfektion.
- AHP-indholdet er mildt over for overfladerne, hvilket øger deres levetid.
- Ingen rester på overfladen.
- Velegnet til brug i højrisiko-områder i butikker, undervisningslokaler, sundhedsvæsenet og i mange andre områder.
- Forbedrer desinfektionsvirkningen med 35 %, fordi det er let og hurtigt at udføre

Brugsanvisning

Fjern synligt snavs.

1. Fjern synligt snavs.
2. Luk pakken med klude op, tag en enkelt klud og luk låget.
3. Indgnid overfladen med kluden, vær sikker på, at hele overfladen er fugtig, lad overfladen tørre.
4. Sørg for, at overfladen forbliver fugtig i den krævede kontakttid.
5. Udskift kluden, når den ikke længere kan fugte overfladen, når den er blevet snavset, eller når et nyt område skal rengøres.

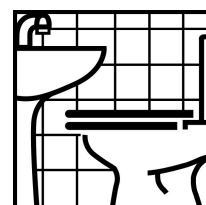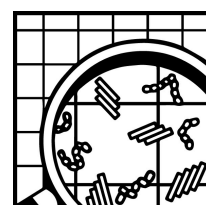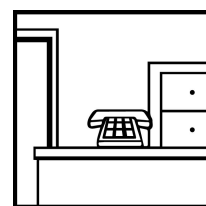

© A.I.S.E



Diversey™

Oxivir Excel Wipe

Tekniske data

pH-værdi (ufortyndet): < 2
pH-værdi (brugskoncentration): ~ 2
Relativ vægtfylde (g/cm³; 20°C): ≈ 1.00

Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses som specifikationer.

Sikker håndtering og opbevaring

Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat sikkerhedsdatablad på sds.diversey.com. Opbevares i lukket originalemballage. Undgå ekstreme temperaturer.

Kun til professionelt brug/specialister.

Mikrobiologiske data

Se oversigten med EN-test her: Egenskaber testet efter forskellige europæiske standarder.

Test er foretaget under urene forhold.

Bakteriedræbende egenskaber/kontaktid

EN1276* / 1 minut

EN13727 / 30 sekunder

EN16615 / 1 minut

Gærsvampedræbende egenskaber

EN1650* / 5 minutter

EN13624 / 5 minutter

EN16615 / 1 minut

Virusdræbende egenskaber

EN14476 / 30 sekunder

(Adenovirus, Poliovirus, Murine Norovirus)

* Test er udført på urene ikke-medicinske overflader

Miljøinformation

De overfladeaktive stoffer i produktet er bionedbrydelige i overensstemmelse med kravene i EU Detergent Regulation, EC 648/2004

Emballagestørrelser

Varenummer	Varenavn	Platform
100984248	DI Oxivir Excel Wipe FLW 12x100pc W3	Wipes
100984250	DI Oxivir Excel Wipe FLW 12x30pc W406	Wipes
101104771	DI Oxivir Excel Wipe FLW 24x100pc W3	Wipes
101105022	DI Oxivir Excel Wipe 6x160pc W4098	Wipes
101105124	AntibacOxivir ExcelW.FLW 12x100pc DK,N,S	Wipes

www.diversey.com

© 2022 Diversey, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. 19/04/2022 da-DK (K00249)